


# Injectie-instructie voor Aranesp® SureClick™ in been of arm


Lees voor u begint alle 8 stappen aandachtig door!

## BEWAREN

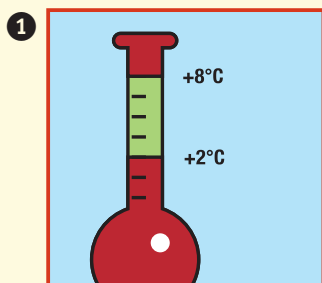

### ARANESP BEWAREN


Aranesp dient in de koelkast te worden bewaard bij een temperatuur van +2°C tot +8°C. Let op dat u de Aranesp® SureClick™ niet tegen de achterwand van de koelkast of in de buurt van het vriesvak legt.

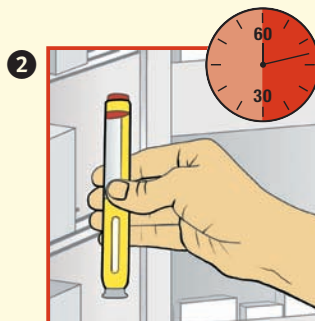

### ARANESP VOOR GEBRUIK


De Aranesp® SureClick™ dient 30-60 minuten voor gebruik uit de koelkast te worden gehaald. Aranesp niet gebruiken als u denkt dat het bevroren is geweest. U kunt Aranesp voor gebruik uit de koelkast nemen, maar niet langer dan 7 dagen bij kamertemperatuur (tot 25°C) bewaren.

## VOORBEREIDEN

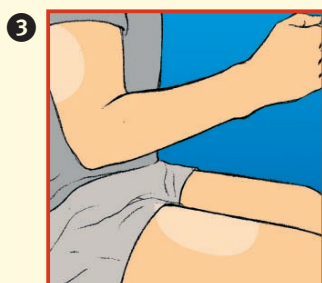

### KIES EEN INJECTIEPLAATS


- Als u uzelf injecteert, kies dan het bovenbeen.
- Als iemand anders u injecteert, kan ook de achterkant van de bovenarm worden gebruikt.

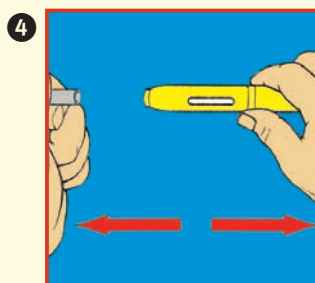


### HET VERWIJDEREN VAN DE NAALDDOP

- Verwijder de grijze naalddop door deze recht naar achteren te trekken (niet draaien of buigen).

## PLAATSEN

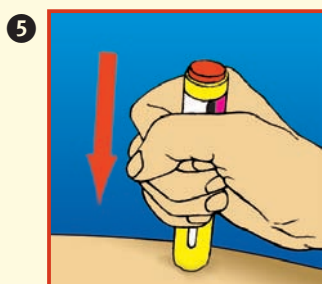

- Huid spreiden met duim en wijsvinger
- Plaats de Aranesp® SureClick™ loodrecht op de injectieplaats, **zonder** uw duim op de rode knop te plaatsen.

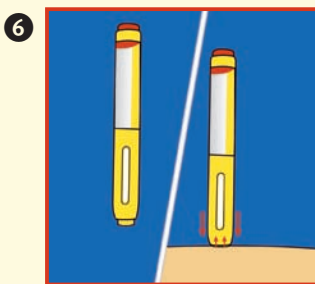


- Druk de Aranesp® SureClick™ stevig op de huid, **zodat de gele ring volledig wordt ingedrukt.**
- Houd de Aranesp® SureClick™ in deze positie gedurende de gehele injectie.

## INJECTEREN



### RODE STARTKNOP INDRUKKEN

- Druk met de duim op de rode startknop. U hoort een **KLIK!**
- Laat de rode startknop direct weer los.
- Houd de Aranesp SureClick™ in deze positie en tel langzaam 15 seconden tot einde van de injectie.

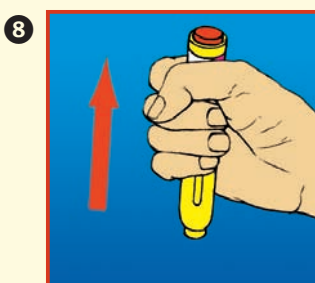

### WEGHALEN

- U kunt de Aranesp SureClick™ nu recht omhoog weghalen.
- Controleer het venster om te bekijken of de volledige dosis is toegediend. Het controlevenster dient nu volledig geel te zijn. Indien dit niet het geval is, raadpleeg uw arts, verpleegkundige of apotheker.

### NB:

- Wacht tot de injectie klaar is voordat de druk wordt opgeheven.
- U kunt een tweede klik horen wanneer de rode knop weer omhoog komt.
- De injectieplaats kan een beetje bloeden. U kunt een watte of gaasje op de injectieplaats houden.
- Niet wrijven over de injectieplaats. Indien nodig kunt u de injectieplaats bedekken met een pleister.

[www.sureclick.nl](http://www.sureclick.nl)  
voor vragen: 076 573 25 00

